

Inzendinstructie celmateriaal baarmoederhals

Voor uitgebreide instructie: zie Vademecum op www.labpon.nl



Schrijf met potlood naam en geboortedatum van de patient op het Surepath™ potje of plak een sticker met deze gegevens (niet op het deksel).



Breng het centrale deel van de Cervex-Brush® Combi in de baarmoedermond. Druk de borstelharen tegen de baarmoedermond. Draai met aanhoudende lichte druk het borsteltje tweemaal klokswijs rond.



Schuif de Cervex-Brush® Combi van de steel af en deponeer deze direct na afname in het Surepath™ potje voor fixatie. Draai het potje stevig dicht.



Plaats het monsterpotje in de strook absorberend materiaal.



Schuif de strook absorberend materiaal met monsterpotjes, liefst vier per inzending, in de kartonnen houder.



Plaats de kartonnen houder in de safety bag en sluit deze.



Plaats het geheel in het smalle gedeelte van het verzendetui.



Plaats de bijbehorende aanvraagformulieren in het brede gedeelte van het verzendetui.



Sluit beide helften goed. Breng het verzendetui naar een afhaalpunt van LabPON of verstuur het via een postbedrijf.